



## Vídeo Laringoscópio i-view™

Videolaringoscopia sempre que necessitar de proceder a uma intubação



Gestão das vias aéreas ▪ Acessórios de vias aéreas

## Conheça o vídeo laringoscópio i-view™

Tamanho único ▪ Utilização única ▪ Totalmente descartável

O i-view é o novo vídeo laringoscópio da Intersurgical, de utilização única e totalmente descartável, proporcionando uma opção de videolaringoscopia sempre que necessite de proceder a uma intubação.


Tendo incorporada uma lâmina Macintosh, o i-view também pode ser usado em laringoscopia direta, sendo a técnica de inserção mais familiar e instintiva do que em dispositivos com lâmina hiper-angular. Pronto a usar segundos depois de ser retirado da embalagem, a conceção ergonómica do i-view garante uma fácil utilização e o ecrã LCD integrado proporciona uma visualização ideal nas mais diversas condições de luminosidade.



### O i-view oferece a oportunidade de videolaringoscopia 'sempre que necessitar de proceder a uma intubação'

Nas situações em que a disponibilidade de um vídeo laringoscópio possa estar limitada devido às implicações de custos da aquisição de dispositivos reutilizáveis para várias unidades, o i-view proporciona uma solução económica adequada, combinando todas as vantagens de um vídeo laringoscópio totalmente integrado com um produto de utilização única e descartável. O i-view é assim ideal para utilização em

- cuidados pré-hospitalares
- medicina de urgência
- reanimação
- anestesia
- situações críticas de vias aéreas
- cuidados intensivos

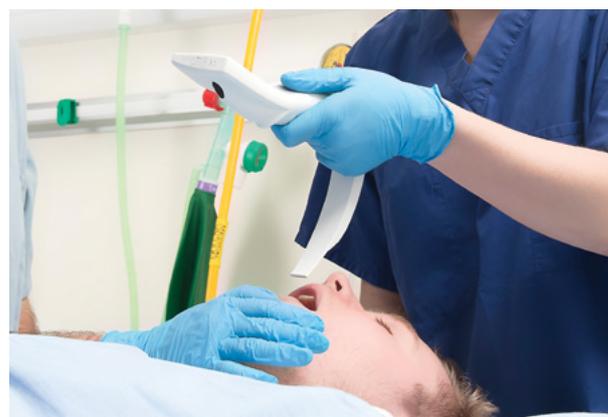

Cuidados intensivos



Cuidados pré-hospitalares/reanimação



Situações críticas de vias aéreas



## Características e vantagens

Videolaringoscopia sempre que necessitar de proceder a uma intubação

### Tamanho único

sem necessidade de armazenar vários tamanhos

### Utilização única

reduz o risco de infeção por contágio, e evita os custos de reprocessamento

### Totalmente descartável

sem necessidade de retirar pilhas antes da eliminação

### Ecrã LCD integrado

proporciona uma visualização ideal nas mais diversas condições de luminosidade

### Conceção ergonómica

garante o conforto do i-view e uma utilização instintiva



### Botão on/off

o i-view fica pronto a usar em segundos após ser retirado da embalagem

### Câmara e luz LED

para uma visualização ideal



### Lâmina Macintosh

o i-view também pode ser usado para laringoscopia direta bem como em videolaringoscopia



▶ Vídeo disponível em [www.intersurgical.pt](http://www.intersurgical.pt)





O i-view é disponibilizado em caixas de 8 unidades. Cada dispositivo é embalado individualmente num invólucro sólido especialmente concebido e selado com uma película de plástico para assegurar a proteção do dispositivo, tanto em transporte como no armazenamento. A embalagem pode ser facilmente aberta através de uma aba no canto com o símbolo do polegar, permitindo retirar a película de plástico até que se possa facilmente remover o produto. O número do LOTE e a data de validade do dispositivo estão localizados na borda superior do ecrã LCD.



Código	Descrição	Caixa Qtd.
8008000	i-view laringoscópio com vídeo	8

Pedir uma informação

i-view laringoscópio com vídeo

[www.intersurgical.pt/info/iview](http://www.intersurgical.pt/info/iview)

Por favor pense antes de imprimir Poupe energia e papel. Se têm de imprimir este folheto informativo imprima frente e verso.



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,  
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal  
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd é certificado de acordo ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2015



O distribuidor Intersurgical Portugal está certificado pela norma ISO 9001 IS6.15 PT • Issue 1 01.19

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic  
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia