



STARMed Ventumask Basic

Para terapia CPAP com controlador de fluxo Venturi e válvula PEEP ajustável



Agora disponível

com opção de porta
do nebulizador

CV209S (Pequeno)
CV209M/L (Médio/Grande)
CV209XL (Extra Grande)

Kit nebulizador não incluído

Cuidados Intensivos ▪ Interfaces do doente ▪ **STARMed**

StarMed Ventumask Basic com controlador de fluxo Venturi e válvula PEEP ajustável

StarMed Ventumask Basic

StarMed Ventumask Basic possui um design único para a terapia CPAP e é simplesmente ativado através da ligação a um fonte apropriada de oxigénio. Pode ser utilizado num ambiente hospitalar ou pré-hospitalar, por exemplo, numa ambulância.

Vantagens e características técnicas

- Ventumask Basic constitui um sistema completo e fácil de utilizar, onde o tubo de fornecimento de oxigénio, um controlador de fluxo Venturi e uma válvula PEEP são parte integrante da máscara CPAP

- O controlador de fluxo Venturi integrado é operado por um único caudalímetro de oxigénio para gerar fluxos elevados para o doente, ao mesmo tempo que consome uma quantidade reduzida de gás comprimido
- A válvula PEEP ajustável integrada é concebida exclusivamente para o Ventumask Basic e a administração ao doente é facilitada através de algumas predefinições: 5 - 7,5 - 10 - 12,5 cmH₂O
- O₂% de 40% pode ser entregue a cada nível PEEP
- O utilizador é guiado por uma tabela de desempenho integral do produto, para estar ciente do fluxo de doente em cada configuração da PEEP

O kit é composto por:

- Máscara CPAP com válvula de segurança e porta para monitorização de O₂% ou pressão efetiva
- Controlador de fluxo Venturi integrado na máscara
- Cintas do arnês de fixação ajustáveis incluídas
- A válvula PEEP ajustável concebida para a Ventumask Basic facilita algumas definições de pressão pré-calibradas
- Tubo integrado de oxigénio



Ventumask Basic para terapia CPAP com controlador de fluxo Venturi e válvula PEEP ajustável

Requisito		Configuração	Fluxo entregue
O ₂ % apróx.	PEEP cmH ₂ O	Fluxo O ₂ L/min	Fluxo apróx. L/min
40%	5	12	57
	7.5	12	52
	10	12	47
	12.5	12	42

Tabela de desempenho sujeita a alterações.
Consultar sempre a rotulagem dos produtos.

Código	Descrição	Tamanho	Qtd. Caixa
CV203S	Máscara para CPAP Ventumask Basic com controlador de fluxo Venturi integrado e válvula PEEP ajustável	Pequeno	5
CV203M/L	Máscara Ventumask Basic para CPAP com controlador de fluxo Venturi integrado e válvula PEEP ajustável	Médio/Grande	5
CV203XL	Máscara Ventumask Basic para CPAP com controlador de fluxo Venturi integrado e válvula PEEP ajustável	Extra Grande	5



www.intersurgical.pt/info/starmed

▶ Vídeo disponível em www.intersurgical.pt

Pedir uma informação



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Itália

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.45_PT • Issue 6 06.20